

Portabel rullstolsvåg för medicinskt bruk  
Förenklad handhavande

MBWD-300P




# Specifikationer

<b>Modell</b>	<b>MBWD-300</b>
Maxkapacitet	300 kg
Avläsbarhet	100 g (0,1 Kg)
Noggrannhet	OIML Klass III
Taraområde	100 %
Min. belastning	2 kg

Display	25 mm hög, 5 segment, LCD-display med bakgrundsbelysning
Konstruktion	Stålrörskonstruktion
Produkt storlek	1220 x 130 mm
Balk storlek	920 x 130mm
Stabiliserings tid, ca	3 sekunder standard
Arbetstemperatur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Strömförsörjning	12V1A AC adapter och 6xAA batterier
Eu-verifierad i enlighet med 2014/31/EU	Klass III
MDD-godkänd i enlighet med 93/42/EEC	Klass Im

# Frontpanel

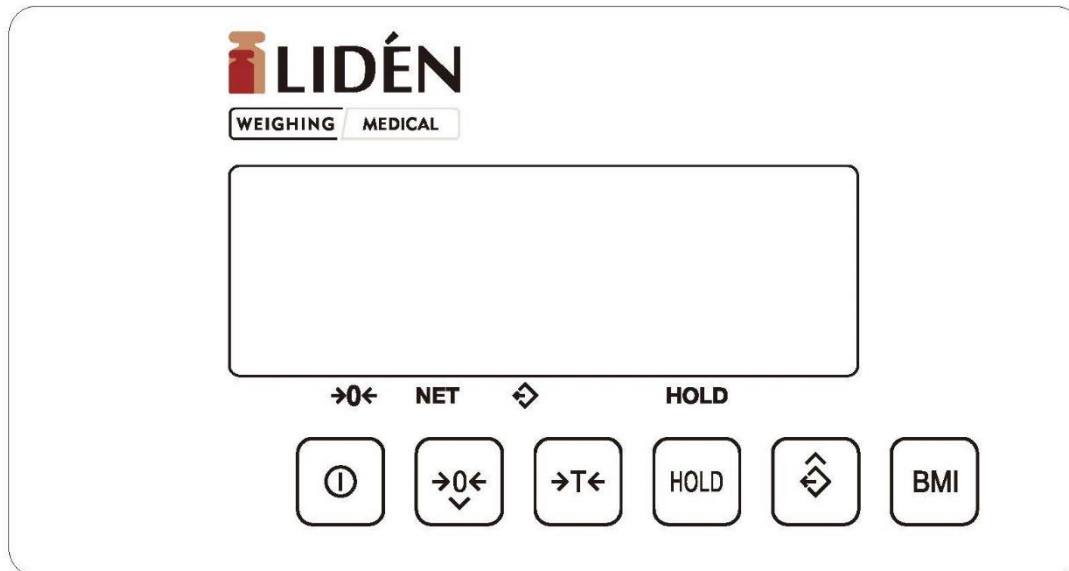

# Knappar



På / Av



Nollställningsknapp



Tareringsknapp



Holdfunktion



Återkalla



BMI-funktion

## Symboler



Nollindikering



Nettoindikering/Vågen är i tarerat läge



Återkallat värde



Låst värde



Stabilt värde

## Handhavande & knappfunktioner



På / Av

Tryck kort för att sätta på och stänga av vågen.




Nollställningsknapp


Nollställer vågens display. Används vid obelastad våg.

 indikeras.



Tareringsknapp


Tareringsknappen används för att tarera sådant som vägs tillsammans med patienten, (t ex kläder, skor eller annat). Gör så här: placera en vikt (kläder, skor eller annat) på vågen. Tryck på  för att dra bort denna vikt. Displayen kommer att visa **NET**.


Ta bort (kläder, skor eller annat) och tryck på  för att gå ur tarafunktion.




Manuell eller automatisk holdfunktion






I nolläge kan man använda sig av manuell eller automatisk holdfunktion genom att trycka på  i displayen visas **Hold Auto** eller **Hold Off**.

**Manuell hold:** Ställ dig på vågen. Vänta på stabilt värde och tryck sedan på  för att låsa värdet.

Displayen återgår till noll efter ca en sekund. Värdet hämtas upp genom att trycka på  Återkalla.



**Automatisk Hold:** Ställ in **Hold Auto** enligt ovan genom att trycka på . Ställ dig på vågen. Vid stabil vikt kommer vågen automatiskt låsa värdet. Om vikten efter låsning förändras mer än 4 kg aktiveras vågen igen och kommer, när vågen är stabil, återigen att automatiskt låsa värdet.

 BMI – Body Mass Index

1. Ställ en person på vågen och vänta tills vågen är stabil.
2. Tryck på  och använd sedan  eller  för att ställa in personens längd. Tryck sedan åter på  för att avsluta och visa uträknat BMI.
3. BMI-värdet försvinner när personen lämnar vågen men kan återkallas med .

## Byte av batterier

1. Koppla bort strömförsörjningen till vågen.
2. Ta bort batteriluckan på baksidan av indikatorn.
3. Sätt in 6 stycken nya AA batterier och var noga med att polerna sitter rätt.
4. Stäng batteriluckan.

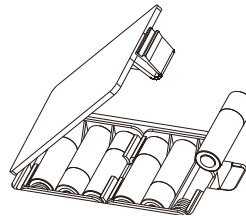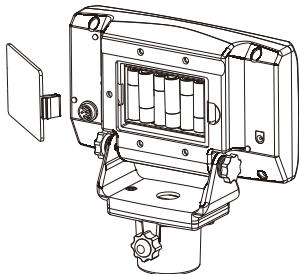

**OBS!** Använd vanliga AA batterier. Om ni använder uppladdningsbara batterier så behöver batterierna laddas i extern laddare. Vågens adapter kan inte ladda batterierna när de sitter i vågen.

### Tänk på att:

Vid förflyttning av vågen ska kablage plockas bort och återmonteras. Var uppmärksam på hur kablaget ska monteras igen.

## **Rengöring**

Innan rengöring. Var säker på att strömkontakten inte sitter i vägguttaget.

1. Vänligen använd inga stora mängder med vatten, då det kan skada vågens elektronik.
2. Rengör all extern yta enbart med en fuktad trasa.

## **Kontrollrutiner**

Vågen är verifierad vid leverans, vågen ska omverifieras om plomberingen (SEAL) är bruten vid ex. reparation av vågen.

Alternativt om man misstänker att vågen visar fel.

Egna kontroller kan göras med bestämd vikt, men är inte nödvändiga.