

BRUKSANVISNING

SWASH[®] PERINEUM GLOVES 4 & 8-PACK

Produktkod: Co4070-4 (UDI-DI: 08717127937172) / Co4070-8 (UDI-DI: 08717127937332)


Användare: Professionell eller vårdgivare

Avsedd ändamål:

Swash[®] Perineum Gloves är avsedda för perineal vård av inkontinenta patienter som en åtgärd för att förhindra hudskador i samband med exponering för urin eller avföring (IAD) eller som en åtgärd för att hantera sådana hudskador (IAD) i ett tidigt skede.

Stödmaterial:

- Engångshandskar
- Papperskorg
- Swash[®] Rengöringsservetter eller andra förfuktade våtservetter, silkespapper (om nödvändigt)
- Inkontinensmaterial (om nödvändigt)
- Rena kläder och/eller linne (om nödvändigt)
- Mikrovågsugn (om nödvändigt)

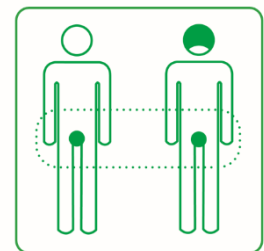

Användningsinstruktioner:

Använd tillräckligt med handskar för att rengöra det smutsiga mellangårdsområdet (se piktogram). Om så önskas kan förpackningen värmas i mikrovågsugn. Kontrollera temperaturen före användning. Använd varje paket endast för en person. Se nedan för detaljerad procedur.

Detaljerad procedur:

Swash[®] Perineum Gloves kan förvaras på avdelningen på en central plats eller bredvid vårdtagarens säng. Swash[®] Perineum Gloves kan användas både uppvärmda och i rumstemperatur.

- 1 Om så önskas, värm upp Swash[®] Perineum Gloves. Den rekommenderade temperaturen uppnås genom att värma förpackningen till max 800 watt i en mikrovågsugn i 15 sekunder (4-pack) eller 20 sekunder (8-pack).
- 2 Berätta för vårdtagaren vad du ska göra och fortsätt att kommunicera under hela tvättproceduren.
- 3 Innan du börjar, tvätta händerna och ta på dig ett par engångshandskar.
- 4 Låt vårdtagaren ligga i ryggläge med en kudde under huvudet. Låt vårdtagaren ta av sig sina ytterkläder; hjälp vid behov vårdtagaren med detta. Ta hänsyn till vårdtagarens integritet.
- 5 Ta bort vått och smutsigt inkontinensmaterial.
- 6 Vid behov kan stora mängder avföring försiktigt avlägsnas med Swash[®] Cleaning Wipes eller förfuktade våtservetter, servetter etc.
- 7 Öppna paketet med Swash[®] Perineum Gloves och ta fram en handske. Kontrollera temperaturen på torkaren. Obs: engångshandskar minskar din känslighet för värme.
- 8 Tvätta underlivet med en Swash[®] Perineum Gloves. Huden torkar av sig själv genom avdunstning av lotionen. Torka vid behov hudvecken genom att torka med silkespapper.
- 9 Be vårdtagaren att vända sig på sin sida och ge stöd vid behov. Rengör den nedsmutsade mellangårdsregionen (rumpen och svanskotan) hos vårdtagaren med en Swash[®] Perineum Gloves. Använd så många handskar som behövs för att avlägsna all avföring och/eller urin från huden. Placera helst det använda Swash[®] Perineum Gloves i inkontinensmaterialet.
- 10 För ett optimalt resultat, använd en ren Swash[®] Perineum Glove för en sista tvätt. Det kommer att lämna ett skyddande lager på huden.

- 11 Inspektera mellangårdregionen för inkontinensassocierad dermatit och andra hudtillståndsvARIABLER.
- 12 Ge vårdtagaren nytt, rent och torrt inkontinensmaterial. Byt sängkläder om de är våta eller smutsiga och klä på vårdtagaren igen och ställ honom/henne i önskad position.
- 13 Kasta det tomma paketet av Swash® och handskarna i papperskorgen. **SPOLA INTE Swash® Perineum Gloves / Swash® Cleaning Wipes i toaletten!**
- 14 Rapportera eventuella förändringar i hudens tillstånd efter mellangårdtvättningen.
- 15 Upprepa denna procedur efter varje urin- eller fekal inkontinens.

UPPSEENDE:

- Se alltid till att ta hänsyn till patientens känslor, komfort och avskildhet.
- Varje paket ska endast användas för **en** person.
- Det rekommenderas starkt att använda en öppnad förpackning inom 48 timmar. Om det finns handskar kvar i förpackningen, skriv ner datum och tid på förpackningen och använd handskarna för samma patient inom 48 timmar.
- Undvik kontakt med ögonen.
- Endast lämplig för extern användning.
- Om Swash® Perineum Gloves värms upp enligt instruktionerna på förpackningen, det är viktigt att kontrollera temperaturen på handskarna innan de används på huden. Använd **INTE** omedelbart om de är för varma. Kom ihåg att engångshandskar minskar känsligheten för värme. Var särskilt uppmärksam på att kontrollera temperaturen med spädbarn eller personer som inte kan reagera eller personer med känslig hud.
- **Spola inte ner tvättlapparna i toaletten. Kasta den tomma förpackningen med Swash® och handskarna i soptunnan.**

KONTRAIKATIONER:

- Om vårdtagaren vägrar att använda den
- Om det är känt att vårdtagaren är känslig eller allergisk mot en eller flera av ingredienserna
- On icke intakt hud och öppna sår



PIKTOGRAM I PAKET:

	Temperaturgräns		Använd inom 48 timmar efter öppnandet
	Håll borta från solljus		Kasta till soptunnan
	Håll torrt		Mörka inte
	Använd inte om förpackningen är skadad och se bruksanvisningen		Uppvärmningsråd
	Återanvänd inte		Produkt fri från latex
	Icke steril		Tillverkad i ett rent rum
	Medicinsk utrustning		Produkten innehåller inte doft
	CE-märkning		Spola inte
	Batchkod		Se bruksanvisningen eller se elektroniska bruksanvisningar
	Tillverkare		
	Använd efter datum		
	Unik enhetens identifierare		

Informationen i detta protokoll avser specifikt användningen av Swash® Perineum Gloves för rengöring av perineumregionen hos inkontinenta personer. Ytterligare interventioner och steg kan läggas till i protokollet i enlighet med andra protokoll och riktlinjer på din vårdinrättning.

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherlands
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com